


Ideal als temporäre Lösung für  
**implantatgetragenen  
Zahnersatz!**

- ▶ Flexibel und Biokompatibel
- ▶ Keine Metallklammern
- ▶ Hervorragend kombinierbar mit Modellguß
- ▶ Hochästhetisch und lebenslange Garantie



**Sunflex**  
P A R T I A L S

 **Sun**  
D E N T A L L A B S

 +49 211 87584-600  
[info@sudentallabs.de.com](mailto:info@sudentallabs.de.com)  
[www.sudentallabs-germany.de](http://www.sudentallabs-germany.de)

Oberbilker Allee 163 – 165, 40227 Düsseldorf, Germany

Sunflex®, Sunflex® Partials and SunSparkle™ are registered trademarks of Sun Dental Labs, LLC

**Sunflex**  
P A R T I A L S

Nahezu **unsichtbar**,  
**unzerbrechlich**,  
**monomerfrei**  
und **flexibel**

 **Sun**  
DIGITAL DENTAL LABS





# Unzerbrechlich, dabei leicht und transparent ... Somit wird der „Durchschein-Effekt“ des natürlichen Zahnfleisches unterstützt.

**Keine Metallklammern**

Extrem flexibel

Volle Funktionalität und hoher Tragekomfort

**Bessere Farbstabilität als andere flexible Kunststoffe**

**Unübertroffene Ästhetik**

Ist erweiterbar und kann unterfüttert werden

Ideal für Patienten, die sich für einen günstigen herausnehmbaren Zahnersatz entschieden haben – aber auf Metallklammern verzichten möchten

## Häufig gestellte Fragen (FAQ's)

**F: Wie lang ist die Lebensdauer meiner Sunflex® Teilprothese?**

A: Sunflex® Teilprothesen sind so gefertigt, das sie ein Leben lang halten. Sollten aufgrund von Veränderungen der Mundsituation (weiterer Zahnverlust etc.) Erweiterungen und Unterfütterungen nötig sein, so geben wir auch auf diese ausgeführten Arbeiten eine lebenslange Garantie.

**F: Kann ich meine Prothese auch über Nacht tragen?**

A: Größtenteils wird es nicht empfohlen, herausnehmbaren Zahnersatz auch nachts zu tragen. Fragen Sie Ihren Zahnarzt / Ihre Zahnärztin. Dort werden Sie individuell beraten.

**F: Wenn ich meine Prothese einmal nicht trage, wie muß ich sie dann aufbewahren?**

A: Um optimale Ästhetik und Funktionalität zu gewährleisten, empfehlen wir die Aufbewahrung im Wasserbad oder im Sunflex®-Prothesenreiniger.

**F: Wird Sunflex® meine Aussprache beeinträchtigen?**

A: In der Regel nicht, aber in seltenen Fällen können anfangs Probleme mit der Prothetik auftreten. Dies ist aber kein Grund zur Besorgnis, da sich schon nach kürzester Zeit die gewohnte Lautbildung wieder einstellt.

**F: Wie kann ich meine neue Sunflex® Teilprothese optimal pflegen?**

A: Eine genaue Pflegeanleitung finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

## Pflegehinweise

Sunflex® Teilprothesen werden aus einem biokompatiblen thermoplastischem Nylonmaterial gefertigt. Das bedeutet, dass sich die Pflege Ihres neuen Zahnersatzes völlig unkompliziert gestaltet. Um den optimalen Zustand und das natürliche Aussehen Ihres Zahnersatzes zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise.

- ▶ Befolgen Sie bitte die Pflegehinweise Ihres Zahnarztes / Ihrer Zahnärztin für Ihre natürlichen Zähne und Ihr Zahnfleisch.
- ▶ Reinigen Sie Ihren Zahnersatz bitte täglich. Einfach unter warmen fließendem Wasser 30 - 60 sek. lang abspülen und für ca.

- ▶ 15 min. im SunSparkle™-Reinigungsbad (o.ä. Prothesenreiniger) einwirken lassen.
- ▶ Säubern Sie die Prothese mit einer weichen Zahnbürste und ausschließlich mit Wasser. Verwenden Sie bitte keine extra zahnaufhellenden Zahnpasten oder ähnliche Produkte, da diese kleine Partikel enthalten, die die Oberfläche des Materials angreifen könnten.
- ▶ Sollten Sie Ihre Prothese einmal nicht tragen, so bewahren Sie diese bitte in einem Wasserbad auf.
- ▶ Bitte denken Sie daran: Die Prothesenbasis ist unzerbrechlich, die Zähne sind es nicht!



**Erhältlich in 4 verschiedenen Farben**

